

AURIGA

 DIPROGRESS



Video Ingranditore Modello RS700X

Manuale di Istruzioni

Auriga Srl – via M.F. Quintiliano, 30 – 20138 Milano – tel.
025097780 – email auriga@auriga.it – www.auriga.it
Assistenza tecnica: tecnico.ottica@auriga.it - 025097286

Indice

Benvenuti	3
Caratteristiche del prodotto	3
Confezione & accessori.	5
Specifiche Tecniche	6
Struttura del prodotto	7
Introduzione all'uso	8
1、 Installazione della scheda di memoria	8
2、 Ricarica della batteria	9
3、 Accensione/Spegnimento	10
4、 Utilizzo del video ingranditore	10
Introduzione alle funzioni.	11
1、 Interruttore della modalità colore	11
2、 Regolazione dell'ingrandimento.....	13
3 Funzionamento del Touch Screen (facoltativo)	14
3、 Selettore degli obiettivi lontano e vicino	15
4、 Funzione autofocus (facoltativa)	17
5、 Fermo immagine	19
6、 Riga di lettura	20
7、 Memorizzazione e riproduzione di immagini.....	21
8、 Controllo a voce (opzionale).	24
9、 Promemoria vocale.	25
10、 Torcia elettrica.	26
11、 Funzione memoria.	26
12、 Risparmio energetico	27

13	、	Messaggio di batteria scarica.	28
14	、	Scrittura a mano libera	28
15	、	Collegamento a TV	29
16	、	Collegamento a computer	30
		Introduzione ai menu	31
	●	Regolazione luminosità schermo LCD.	31
	●	Regolazione della luminosità LED bianchi	32
	●	Regolazione volume segnale acustico	32
	●	Attivazione e disattivazione Touch Screen (facoltativo)	33
	●	Controllo vocale (opzionale)	33
	●	Impostazione data e ora	33
	●	Impostazione modalità colore	34
2	、	Menu riproduzione	34
	●	Eliminare promemoria vocale corrente	35
	●	Eliminare tutti i promemoria vocali.	35
	●	Eliminare foto corrente	35
	●	Eliminare tutte le fotografie.	36
	●	Formattare il disco.	36
3	、	Menu Informazioni	37
	●	Visualizzazione carica della batteria	37
	●	Visualizzazione informazioni dei file	37
	●	Visualizzazione informazioni disco	37
	●	Visualizzazione informazioni versione	38
		Requisiti configurazione computer.	38
		Precauzioni	39
		Problemi e soluzioni	40

Benvenuti

Vi ringraziamo per l'acquisto del nostro video ingranditore digitale portatile!

Leggete e conservate questo manuale accuratamente. Esso vi aiuterà ad utilizzare al meglio questo video ingranditore per la lettura dei vostri libri, giornali e documenti.

Caratteristiche del prodotto

Il nostro prodotto è un videoingranditore digitale portatile con risoluzione FullHD 7.0, dotato di alte prestazione e con un favorevole rapporto prestazioni-prezzo.

- Grande schermo antiriflesso da 7 pollici con risoluzione 1024x600, alta definizione e illuminazione elevata;
- Fotocamera da 8 Megapixel per visualizzazione di soggetti lontani e vicini, nitido e con colori naturali;
- Dotato di funzione a doppio autofocus con elevata profondità di campo copertura da 5 cm fino all'infinito (opzionale);
- Obiettivo di fascia alta personalizzato con ampio angolo di campo e profondità di campo estesa, più testo e lettura continua;
- 1080P30 (obiettivo per visione soggetti lontani), 720P60 (obiettivo per visione soggetti vicini), senza ritardo, senza immagini impastate, visione fluida in HD;
- Elaborazione immagini professionale DSP per ripristinare colori e dettagli realistici;
- algoritmo intelligente per ottenere un aumento di nitidezza e fedeltà delle immagini, si adatta alla scena dell'immagine in modo intelligente, riproducendo correttamente i dettagli quando si aumenta l'ingrandimento;
- Supporta lo scatto di fotografie e la loro riproduzione, salvando fotografie e testo in modalità HD (alta risoluzione)
- Ingrandimento 2X-32X all'infinito, la funzione di ingrandimento intelligente 2X migliora i pixel effettivi e la nitidezza di un fattore 4x;

-
- Tasto concavo a due colori, ad alto contrasto, consente il controllo con un tocco senza incertezze;
 - Dotato di staffa pieghevole, lo schermo ha un angolo di 40 gradi rispetto alla scrivania per permettere una comoda lettura e per facilitare la scrittura di testi;
 - Modalità a 26 colori selezionabili in base ai gusti dell'utilizzatore;
 - Funzione di personalizzazione della modalità Colore, permette la regolazione delle combinazioni di colori, esaltazione della nitidezza e altro;
 - Funzione Fermo Immagine, utile per visualizzare meglio i dettagli da vicino;
 - Funzione ingrandimento panoramico; l'immagine ingrandita può essere spostata in tutte le direzioni per facilitare la lettura;
 - Funzione di lettura in linea, assiste nel posizionamento del testo per poter leggere più facilmente;
 - Il controllo vocale è di facile uso per chi ha una vista particolarmente ridotta (facoltativo);
 - Il controllo vocale è di facile utilizzo per gli ipovedenti;
 - La funzione Promemoria vocale è disponibile per annotare il contenuto di un'immagine con un commento vocale;
 - Funzione Supporto della modalità vibrazione, utile per l'uso silenzioso, con controllo a tocco delle dita (opzionale);
 - Interfaccia utente con icone di grandi dimensioni, chiara e concisa;
 - Retroilluminazione regolabile per ottenere una visione confortevole e non abbagliante; illuminazione regolabile dei LED bianchi, adatto a leggere lo schermo di uno smartphone, di tablet e di altri supporti di lettura;
 - La scheda di memoria TF può espandere all'infinito la capacità di archiviazione del dispositivo;
 - La funzione Memoria può automaticamente salvare tutte le impostazioni decise dall'utente e ricordare le abitudini dell'utente;
 - Presa AV e presa HDMI 1080i60 permette il collegamento del dispositivo ad una TV HD per fornire una visualizzazione a maggiore ingrandimento e ancora più nitida;
 - Dotato di prese USB di TIPO-C, sia maschio che femmina;

-
- la funzione torcia elettrica consente di illuminare l'ambiente in caso di necessità;
 - Batteria ricaricabile di alta capacità, con modalità risparmio energetico, conferisce al dispositivo un'autonomia di 4 ore;
 - Funzione risparmio energetico intelligente; spegnimento automatico quando lo schermo è inattivo e non vengono usati comandi per 3 minuti.

Nuovo algoritmo, nuovo progetto e nuova configurazione vi offrono una nuova esperienza visiva portatile, con un video fluido, nitido, luminoso e ad alta definizione!


Contenuto della confezione

- Video ingranditore digitale 1 pz
- Alimentatore / Caricabatteria 1 pz
- Cavo HDMI 1 pz (opzionale)
- Manuale utente 1 pz
- Cavo uscita video 1 pz
- Borsa Protettiva 1 pz
- Cavo ricarica DC IN 1 pz
- Panno pulizia 1 pz

Specifiche Tecniche

- Schermo: 5.0 pollici (diagonale 127 mm) schermo LCD HD a colori (risoluzione 800x480)
- Numero di pixel: 8 megapixel (lontan), 8 mega pixel (obiettivo per soggetti vicini);
- Ingrandimenti: da 2X a 32X per soggetti all'infinito;
- Modalità Colore: 26 tipi;
- Supporto modalità personalizzate;
- Doppio obiettivo;
- Autofocus: Opzionale (Obiettivo per soggetti vicini: 5 cm ~ 20 cm; Obiettivo per soggetti lontani: 20 cm ~ infinito);
- Schermo Touch capacitivo: opzionale
- Regolazione del Bilanciamento del bianco;
- Regolazione luminosità;
- Funzione di memorizzazione;
- Funzione Fermo immagine;
- Funzione spostamento dell'immagine;
- Riga di lettura;
- Memorizzazione e riproduzione immagini;
- Supporta scheda di espansione di memoria fino a 32GB (scheda SD);
- Funzione Torcia elettrica;
- Uscita TV: Supporta AV e HDMI 1080i60;
- Controllo Voce: Opzionale;
- Comando vocale: opzionale;
- Promemoria a voce, Registrazione vocale fino a 30 secondi;
- Comando a Vibrazione: Opzionale;
- Supporto da tavolo fornito a corredo;
- autonomia di funzionamento: più di 4 ore;
- Capacità batteria: batteria al litio ad alta capacità da 2500 mah, ricaricabile;
- Dimensioni ingranditore: 195 mm (lunghezza) x 125 mm (larghezza) x 25 mm (altezza);
- Peso: 435 g (con schermo Touch); 395 g (senza schermo Touch)



Struttura del prodotto

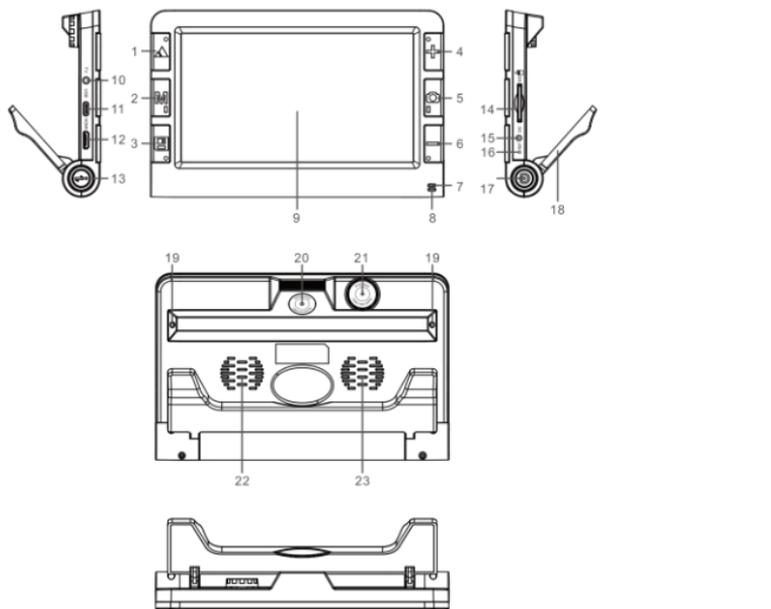

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tasto Lontano/Vicino ▲ | 9. Schermo | 17. Tasto di accensione |
| 2. Tasto Modo M | 10. Interfaccia AV | 18. Supporto |
| 3. Tasto Save (salva) E | 11. Presa USB-C | 19. LED bianco |
| 4. Tasto Zoom + | 12. Presa HDMI-C | 20. Obiettivo fuoco vicino |
| 5. Tasto Fermo immagine ■ | 13. Pulsante Smart | 21. Obiettivo fuoco lontano |
| 6. Tasto Zoom - | 14. Slot scheda di memoria SD | 22. altoparlante |
| 7. Luce accensione (verde) | 15. Presa DC IN | 23. Foro emissione calore |
| 8. Luce ricarica batteria | 16. Tasto di Reset | |

Introduzione all'uso

1. Installazione scheda di memoria SD

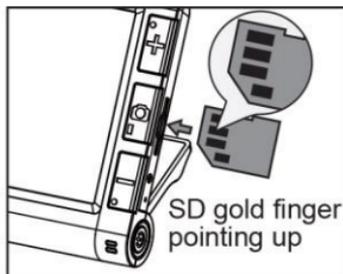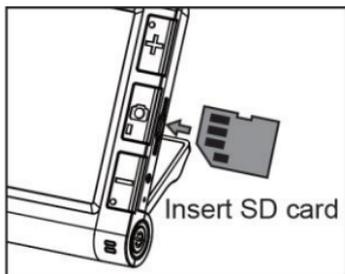


Installazione scheda di memoria

I contatti dorati della scheda devono puntare verso l'alto.

1. Con i contatti della scheda di memoria rivolti verso l'alto, inserire la scheda all'ingresso dello slot (fessura);
2. Spingere la scheda all'interno dello slot; il dispositivo emetterà un suono di conferma quando la scheda sarà nella posizione corretta;


4. Ricarica della Batteria

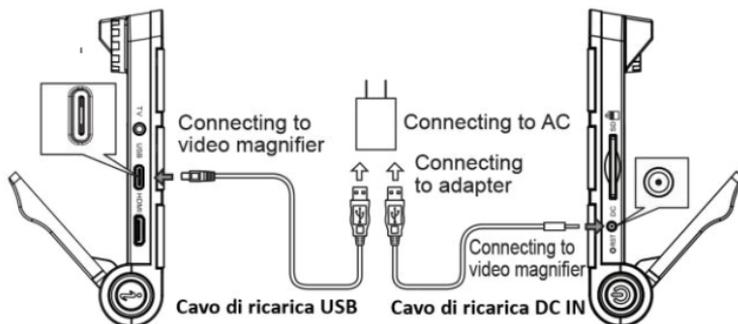


1. Collegare il video ingranditore al cavo USB o al cavo DC IN;
2. Collegare l'adattatore alla presa di rete 220V;
3. La luce di carica (luce rossa) è accesa durante la ricarica;
4. La luce rossa si spegnerà a carica completa;
5. La prima volta che si usa l'ingranditore, caricare completamente la batteria;
6. Quando appare il segnale di batteria quasi scarica, ricaricate la batteria in tempo.

Attenzione: Durante il processo di ricarica, accertatevi che il caricabatterie e il video ingranditore abbiano una buona dissipazione del calore e una buona ventilazione, in modo da evitare pericoli dovuti al surriscaldamento. La ricarica tramite cavo USB può richiedere più tempo; per ottenere una ricarica rapida è meglio usare il cavo DC IN.

3. Accendere e spegnere il video ingranditore

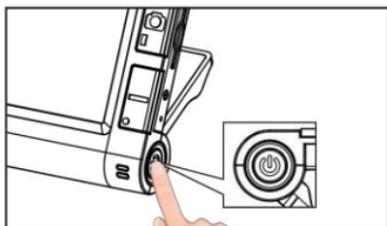

Premere a lungo il tasto a destra per accendere

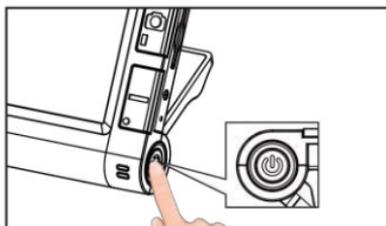

Premere a lungo il tasto a destra per spegnere

1. Premere a lungo il pulsante  in fondo a sinistra e il video ingranditore si accenderà, l'indicatore verde si accenderà ed entrerà nella modalità aiuto alla visione;
2. Posizionate l'obiettivo sul foglio da leggere per metterlo a fuoco;
3. L'effetto di lettura ottimale può essere ottenuto regolando l'ingrandimento, la modalità di miglioramento dell'immagine, il fermo dell'immagine e operazioni simili;
4. Premendo di nuovo a lungo il tasto  spegnerete il video ingranditore.

Attenzione: per ottenere i migliori risultati, rimuovere la pellicola protettiva dal display LCD e dalle lenti degli obiettivi prima dell'uso.

4. Utilizzo del video ingranditore digitale

Interruttore della modalità Colore: **Premere il tasto M** (modalità) per accedere alla modalità colore;

Zoom avanti e indietro: **Premete il pulsante Zoom +** per ingrandire l'immagine e **premere il pulsante Zoom –** per rimpicciolirla;

Fermo Immagine: Premere il pulsante Immagine  per attivare il Fermo Immagine e premete di nuovo il pulsante Immagine per disattivare il Fermo Immagine;

Interruttore obiettivo per oggetti lontani e obiettivo per oggetti vicini: **Premere il tasto Lontano/Vicino ▲** per scegliere quale obiettivo utilizzare;

Registrazione e riproduzione di Foto: Premere il **pulsante salva**  per scattare e memorizzare le fotografie, e premere a lungo il pulsante  per riprodurre le foto sullo schermo;

Impostazione parametri di sistema: Premere a lungo il **pulsante M** per accedere alle impostazioni e premere a lungo il pulsante di fermo immagine  per accedere al menu delle informazioni;

Impostazioni autofocus: Premere a lungo il pulsante Smart (per passare dalla messa a fuoco automatica a quella manuale, premere brevemente il pulsante di messa a fuoco  per accedere alla messa a fuoco singola;

Visualizzazione Ora e data: Premere il pulsante di messa a fuoco  per accedere all'interfaccia per l'inserimento dell'ora della data. (versione senza autofocus);

Per maggiori dettagli, fare riferimento al capitolo di Introduzione alle funzioni e impostazione dei menu.

Introduzione alle Funzioni

1. Interruttore modalità colore

Cambia la modalità di miglioramento dell'immagine sullo schermo LCD tramite il pulsante **M** per soddisfare esigenze diverse.

Sono disponibili 26 tipi di modalità di miglioramento dell'immagine:

1) Modalità colore

8) Bianco su blu

15) arancione su bianco

2) modalità miglioramento colore

9) Giallo su nero

16) Bianco su arancione

3) Modalità negativa	10) Nero su giallo	17) Rosso su nero
4) Modalità Monocromatica	11) Giallo su blu	18) Nero su rosso
5) Nero su bianco	12) Blu su giallo	19) arancione su nero
6) Bianco su nero	13) Verde su bianco	20) Nero su arancione
7) Blu su bianco	14) Bianco su verde	21) Giallo su verde
22) Verde su giallo	24) Bianco su rosso	26) Bianco su giallo
23) Rosso su bianco	25) Giallo su bianco	

La modalità colore desiderata può essere personalizzata tramite l'impostazione del menu -> modalità colore, per i dettagli vedere la sezione Impostazione modalità colore.

Where Did 'OK' Come From?

Millions of people use the word is accepted okay if I say, "Okay, I agree." Some people think the word is a Choctavulch word. Experts say the word was first used in the nineteenth century. But many experts agree that the word was first used in the nineteenth century. He said the word began being used in the nineteenth century.

2.0x

agreement or approval. You might say, "Okay, I agree." Or if someone asks you to do something, you might say, "Okay, I agree." Experts do not agree about where the word came from. Some experts say it came from the Native American Indians.

Where Did 'OK' Come From?

Millions of people use the word is accepted okay if I say, "Okay, I agree." Some people think the word is a Choctavulch word. Experts say the word was first used in the nineteenth century. But many experts agree that the word was first used in the nineteenth century. He said the word began being used in the nineteenth century.

16.0x

g:

Where Did 'OK' Come From?

Millions of people use the word is accepted okay if I say, "Okay, I agree." Some people think the word is a Choctavulch word. Experts say the word was first used in the nineteenth century. But many experts agree that the word was first used in the nineteenth century. He said the word began being used in the nineteenth century.

32.0x

al

INGRANDIMENTO 32X


I pulsanti Zoom **+** o Zoom **-** permettono di regolare l'ingrandimento dell'immagine fino a raggiungere l'ingrandimento desiderato;

Questo ingranditore permette di di zoomare in più o in meno in modo continuo tra 2X e 32X.


3. Funzionamento Touch screen (opzionale)

Questo video ingranditore supporta le seguenti funzioni operative dello schermo tattile:

Funzione Picture-in-Picture (immagine nell'immagine): senza ingrandire, trascina il touch screen, ottenere la funzione immagine nell'immagine.

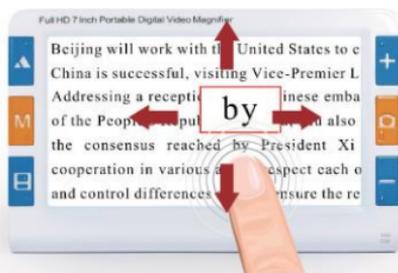

Picture-in-Picture (immagine nell'immagine)

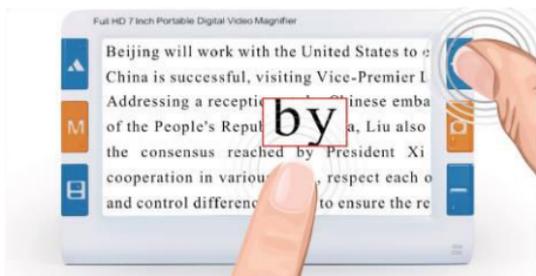

Pulsante Zoom avanti/Zoom indietro per regolare il carattere dell'immagine nell'immagine

Fare click su: funzionamento del pulsante dei Menu;
 Doppio click: operazione di blocco/sblocco immagine;
 Pressione prolungata: cambio di modalità;
 Gesto di ingrandimento: ingrandisci l'immagine;
 Gesto di rimpicciolimento: rimpicciolisci l'immagine;
 Gesto di trascinamento: avvia la funzione Immagine nell'immagine
 senza rimpicciolire;
 Dopo l'ingrandimento, è disponibile la panoramica dell'immagine.

Attenzione:

Se il touch screen è bagnato o sporco, potrebbe causare il malfunzionamento del touch screen. Pertanto consigliamo di tenere pulito il touch screen.

Si prega di utilizzare il caricabatterie originale, un caricabatterie non originale potrebbe causare il guasto o il malfunzionamento del touch screen.

Solo i modelli con il suffisso Plus supportano il funzionamento del touchscreen.

4. Selettore dell'obiettivo per soggetti lontani o vicini



Obiettivo da vicino



Obiettivo da lontano

Per cambiare l'obiettivo per vedere da vicino a quello per vedere da lontano premere il **pulsante Lontano/Vicino ▲**. Le due modalità sono ugualmente nitide;

L'obiettivo da vicino è adatto alla visione di questo tipo di scene: Giornali, libri, spezie, firme, schermo dei telefoni cellulari, tablet, banconote, oggetti d'antiquariato e altri oggetti molto vicini;

L'obiettivo da lontano è adatto alla visione di questo tipo di scene: Lavagna, cartello della fermata dell'autobus, cartelli e segnaletica stradale, listini prezzi e simili.



Messaggio Luce scarsa

Quando la luce della stanza è troppo bassa, o c'è il buio, appare il messaggio Low Light! (luce troppo bassa), come mostrato sopra.

5. Funzione autofocus (facoltativa)

Singola messa a fuoco al centro



Messa a fuoco con il tocco di un singolo punto dell'immagine



Messa a fuoco manuale

Il video ingranditore può raggiungere una completa profondità di campo da 5 cm fino a distanza infinita grazie alla funzione di messa a fuoco automatica;

Premete a lungo il pulsante Smart (i) per passare dalla messa a fuoco automatica alla messa a fuoco manuale;

Messa a fuoco singola: nella modalità autofocus, premere brevemente il pulsante Smart (i) per forzare la messa a fuoco singola al centro dello schermo;

Messa a fuoco manuale: nella modalità messa a fuoco manuale, premere brevemente il pulsante Smart (i), l'icona MF lampeggerà, e mettete a fuoco

manualmente usando i pulsanti **Zoom +** e **Zoom -**;

6. Fermo Immagine



Bloccate l'immagine che vedete sullo schermo



Guardate l'immagine che avete bloccato sullo schermo

Il pulsante di Fermo Immagine (Freeze button)  permette di bloccare l'immagine e di poterla osservare a distanza ravvicinata con

Riga di
lettura
spenta



Premere a lungo il **pulsante Lontano/Vicino ▲** per cambiare la riga di lettura orizzontale, la riga di lettura verticale e disattivare la riga di lettura;


Linea di lettura in movimento: quando la riga di lettura lampeggia, la linea di lettura può essere spostata premendo i pulsanti Zoom **+** e Zoom **-**

8. Memorizzazione e riproduzione immagini


Schermo



Where Did 'OK' Come From?

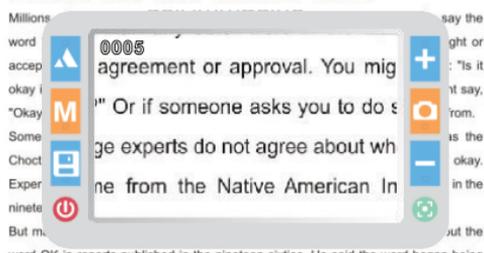

Where Did 'OK' Come From?

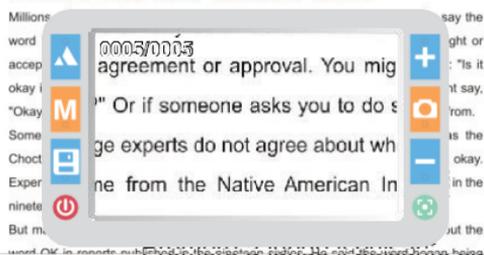

salvare la foto attuale, per effettuare
locale oppure sul computer;

per accedere all'interfaccia per
la riproduzione che permette di riprodurre le foto salvate con il video
ingranditore.

All'interno della modalità riproduzione, i pulsanti sono definiti nel modo seguente:

Pressione del pulsante	Pressione breve	Pressione lunga
Lontano/vicino ▲	Immagine precedente	Immagine sopra (dopo avere ingrandito)
Pulsante M	interruttore modalità Colore	Uscita riproduzione/ Immagine a Sinistra(Dopo avere ingrandito)
Pulsante Salva 	Prossima Successiva	Immagine giù (Dopo avere ingrandito)
Pulsante Ingrandisci +	Ingrandisce l'immagine	Ingrandisce l'immagine
Pulsante Fermo immagine 	promemoria Vocale/riproduzione	Immagine a destra (Dopo l'ingrandimento)
Pulsante riduzione ingrandimento 	Riduce l'ingrandimento dell'immagine	Riduce l'ingrandimento dell'immagine

Attenzione: il numero di file da salvare dipende dalla capacità della scheda di memoria. La memoria integrata può memorizzare da 50 a 100 immagini.

9. Controllo Vocale (opzionale)

Il dispositivo possiede una funzione di controllo a voce che consente di usare le funzioni tramite comandi vocali. Le istruzioni sono le seguenti:

Istruzioni vocali	Istruzione eseguita
Image Freeze (blocca l'immagine)	In anteprima modalità, blocca l'immagine attuale visibile sullo schermo
Image Unfreeze (sblocca l'immagine)	In modalità Fermo Immagine, sblocca l'immagine attuale
Zoom In (Ingrandimento)	Ingrandisce l'immagine
Zoom out (Rimpicciolisci)	Rimpicciolisce l'immagine
Move left (Muove a Sinistra)	Muove a Sinistra l'immagine
Move right (Muove a Destra)	Muove a destra l'immagine
Move Up (muove verso l'alto)	Muove verso l'alto l'immagine
Move down (Muove verso il basso)	Muove verso il basso l'immagine
Lens Switch (cambio obiettivo)	Cambia l'obiettivo da vicino a lontano
Mode Switch (attivazione Modalità)	Attiva modalità miglioramento colore
Photo Save (Salva Foto)	In modalità anteprima, salva la foto corrente
Current Time (ora attuale)	Mostra l'ora e la data corrente e la carica della batteria
Power Off (spegni)	Spegne il video ingranditore

10. Promemoria Vocale


Registrazione
Memo Vocale



Riproduzione
memo vocale



Ferma
riproduzione
memo vocale

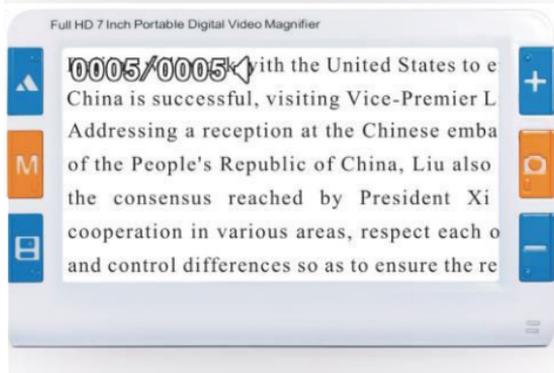

Nella modalità riproduzione:

Premere il **pulsante fermo immagine** , registrare un promemoria vocale sulla foto corrente, ovvero una nota di commento alla foto. Quando viene aperta la foto la volta successiva, la voce riprodurrà automaticamente il contenuto; Durante la registrazione del promemoria vocale, premete il pulsante di Fermo Immagine  per interrompere la registrazione (il memo vocale dura al massimo 30 secondi);

Durante la riproduzione del promemoria vocale, premete il tasto di Fermo Immagine  per terminare la riproduzione della nota.

Attenzione: Quando è già presente un promemoria vocale, cancellatelo all'interno del menu di riproduzione e registrate un nuovo memo vocale.

11. Torcia elettrica

La torcia elettrica permette illuminare temporaneamente il video ingranditore.

Accensione della torcia: a ingranditore spento, continuate a premere il pulsante di Fermo Immagine  e poi premete a lungo premere il pulsante di accensione : la torcia elettrica si accenderà;
Selettore modalità: premere il **pulsante fermo immagine**  per aumentare la luminosità, per ottenere un lampeggio lento, lampeggio, smorzamento e spegnimento;

Regolazione della luminosità: i pulsanti **Zoom +** o **Zoom -** permettono di regolare la luce della torcia elettrica aumentando o diminuendo la sua luminosità (tranne per la modalità gradiente);

Spegnimento della torcia: Premere a lungo pulsante di accensione  e la torcia elettrica si spegnerà.

12. Funzione Memoria

Dopo lo spegnimento, la funzione di memoria può salvare tutte le le ultime impostazioni dell'utente automaticamente e ricordare le

abitudini dell'utente.

13. Risparmio Energetico

Il video ingranditore possiede una funzione di risparmio intelligente dell'energia. Quando non vengono effettuate operazioni e lo schermo resta inattivo per 1 minuto, il dispositivo entra in uno stato di stand-by (sospensione) automaticamente e lo schermo mostra la carica della batteria e l'ora e la data correnti.



one, premete un tasto qualsiasi per riattivare il caso non vengano forniti comandi al dispositivo per 2 minuti, esso si spegne automaticamente per risparmiare energia.

10. Messaggio batteria scarica

Avviso Batteria
Scarica



Funzione Batteria scarica (Low Battery Tips). Lo schermo mostra l'icona Low Battery quando la batteria è scarica e la spia di alimentazione lampeggia.

Quando la batteria è scarica, ricaricatela tempestivamente.

15. Scrittura a mano libera

Il video ingranditore supporta la funzione di scrittura a mano libera. Svitate la vite che fissa l'impugnatura dell'ingranditore aperte la staffa, posizionate l'ingranditore in verticale e scrivete;

Letture
su supporto



Scrittura
a mano
libera con
supporto




La staffa di supporto inclina il video ingranditore rispetto al tavolo. È una posizione ergonomica. Durante la lettura, il collo si trova in posizione naturale, rilassata e confortevole.

Quando scrivete a mano libera, la mano e la penna possono accedere più facilmente all'area di lettura e potete scrivere con scorrevolezza.


Se siete mancini, ruotate l'ingranditore di 180 gradi e cominciate a scrivere.

16. Collegamento alla TV

Collegamento a TV
con cavo AV

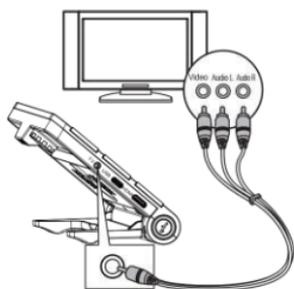


Collegamento a TV
con cavo HDMI

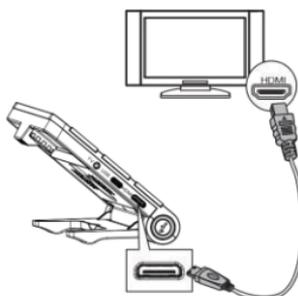

Collegate il video ingranditore a TV con il cavo video AV per visualizzare le immagini su uno schermo più grande e più luminoso;
Collegate il video ingranditore ad una TV con un cavo HDMI per ottenere immagini più nitide e una visualizzazione più fluida rispetto al cavo video AV;
Quando il video ingranditore entra nella modalità di riproduzione video, lo schermo LCD si spegnerà automaticamente.

17. Collegamento ad un computer

Dopo avere effettuato il collegamento ad un computer usando un cavo USB, il computer può riconoscere il disco di memoria che si trova all'interno del video ingranditore e consente la riproduzione delle immagini salvate e dei file di memo vocali, sul computer.

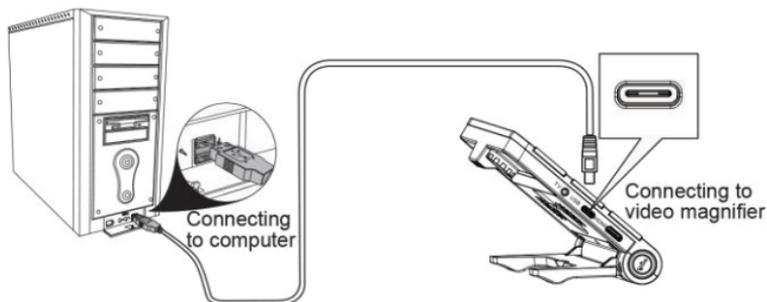

Introduzione ai Menu

All'interno del Modo Apertura Menu, i pulsanti sono definiti come segue:

Premendo il pulsante	Operazione
Lontano/Vicino ▲	Menu Precedente
Modalità M	Menu Uscita
Salva 	Menu successivo
Ingrandisci Zoom +	Opzione precedente
Fermo immagine 	Opzione Impostazioni
Rimpicciolisci Zoom -	Opzione successivo

1. Menu Impostazioni

In modalità anteprima, premere a lungo il pulsante della modalità **M** per accedere al menu di impostazione che consente di impostare i parametri del video ingranditore.

- Regolazione luminosità schermo LCD



Luminosità 1



Luminosità 3



Luminosità 5

Come mostrato qui sopra, i pulsanti **+** e **-** consentono di regolare la luminosità tra i livelli 1 ~ 5.


● Regolazione luminosità LED bianchi



Come mostrato qui sopra, i pulsanti **+** e **-** consentono di regolare la luminosità tra i livelli da 1 a 5.

Attenzione: La regolazione al livello 0 spegne i LED bianchi, una regolazione adatta per leggere principalmente lo schermo degli smartphone, pannelli luminosi e testi scritti su schermi luminosi. All'interno della modalità di visione con obiettivo da vicino, il menu controlla il LED bianco dell'obiettivo da vicino, mentre nella modalità di visione con obiettivo da lontano, il menu controlla il LED bianco dell'obiettivo per visione da lontano.

● Regolazione volume segnale sonoro

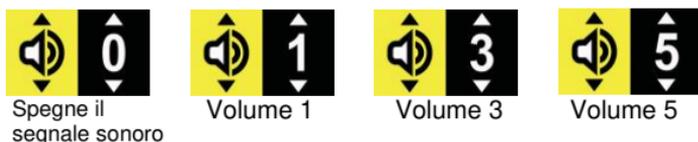

Come mostrato qui sopra, il pulsante **+** e il pulsante **-** consentono di regolare il suono tra i livelli 1 e 5.

Attenzione: al livello 0 il segnale sonoro è spento.

- Attivazione e disattivazione Touch Screen (opzionale)



Touch screen attivo



Touch screen non attivo

Come mostrato sopra, il pulsante **+** e il pulsante **-** consentono di regolare l'attivazione e la disattivazione dello schermo Touch Screen (sensibile al tocco).

Attenzione: Solo i modelli con il suffisso Plus supportano lo schermo Touch Screen.

Attivazione e disattivazione controllo vocale (opzionale)



Controllo vocale attivo



Controllo vocale spento

Come mostrato sopra, il pulsante **+** e il pulsante **-** consentono l'attivazione e la disattivazione del controllo vocale.

Attenzione: solo i Modelli con il suffisso X supportano il funzionamento del touch screen.

- Impostazione di Data e Ora



Impostazione Anno



Impostazione Mese



Impostazione Giorno



Impostazione
Ora



Impostazione
Minuti



Impostazione
Secondi

Come mostrato sopra, il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** consentono di regolare i valori della data e dell'orario. Premere il pulsante Fermo Immagine  per spostare l'opzione di impostazione.

Impostazione modalità colore



Modalità colore



Apri modalità
nero su bianco



Spegni
modalità nero
su bianco

Come mostrato sopra, il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** può modificare le impostazioni. Premete il pulsante di Fermo Immagine  per attivare o disattivare la modalità; Soltanto la modalità selezionata verrà usata nel cambio di modalità; la modalità non selezionata verrà saltata nel cambio modalità.

Attenzione: la modalità colore non può essere disattivata.

2. Menu Riproduzione

Nella modalità riproduzione, premere a lungo il **pulsante M** per accedere al menu di riproduzione e gestire i file.

● Elimina promemoria vocale corrente



Elimina promemoria
corrente



Conferma eliminazione
promemoria vocale
corrente



Eliminazione promemoria
vocale in corso

Come mostrato sopra, usando il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** è possibile selezionare l'opzione confermata e poi premere il **pulsante Fermo Immagine** per eliminare il memo vocale corrente.

● Eliminare tutti i promemoria vocali



Menu cancellazione di
tutti i promemoria vocali



Confermare la
cancellazione di tutti i
memo vocali



Cancellazione in corso di
tutti i memo vocali

Come mostrato sopra, usando il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** è possibile selezionare l'opzione confermata, quindi premere il **pulsante di Fermo Immagine** per eliminare tutti i memo vocali.

● Cancellare la foto corrente



Cancellazione della foto
corrente



Confermare la
cancellazione della foto
corrente



Cancellazione in corso
della foto corrente

Come mostrato sopra, usando il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** è possibile selezionare l'opzione confermata, quindi premere il

pulsante di Fermo Immagine  per cancellare la foto corrente.

- Cancellare tutte le fotografie



Cancellazione di tutte le foto



Confermare la cancellazione di tutte le foto



Cancellazione in corso di tutte le foto

Come mostrato sopra, usando il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** è possibile selezionare l'opzione confermata, quindi premere il **pulsante Fermo Immagine**  per cancellare tutte le foto.

- Formattazione del disco



Menu Formattazione



Confermare la formattazione



Formattazione in corso

Come mostrato sopra, usando il **pulsante Zoom +** e il **pulsante Zoom -** è possibile selezionare l'opzione confermata, quindi premere il **pulsante Fermo Immagine**  per formattare il disco.

Promemoria speciale: Una volta eliminato un file, esso non può essere ripristinato. Fate attenzione!

Una volta formattazione il disco, tutti i file verranno cancellati e non potranno essere ripristinati. Fate attenzione.

3. Menu Informazioni

Premete a lungo il **pulsante Fermo Immagine**  per accedere al menu Informazioni che permette di controllare le informazioni di sistema.

Stato di carica della batteria



Carica minima, sta per spegnersi



Carica bassa



Carica media



Completamente carica

Come mostrato sopra, lo stato di carica della batteria viene mostrato in termini percentuali.

- Informazioni sulla capacità della memoria del dispositivo



Informazione File

Come mostrato sopra, il menu informazioni file visualizza il numero totale di immagini e di promemoria vocali registrate.

- Informazioni disco



Informazioni memoria interna



Informazioni scheda di memoria SD

Come mostrato sopra, il menu informazioni disco visualizza lo spazio libero totale del disco corrente e lo spazio totale.

- Informazioni sulla Versione



Informazioni Versione (l'immagine a destra riporta la scritta Plus e quindi è relativa all'ingranditore con Touch Screen)

Come mostrato sopra, il menu Informazioni Versione visualizza il modello del prodotto, il numero della versione del firmware e la data della pubblicazione del firmware.

Requisiti di configurazione del Computer

Questo video ingranditore digitale richiede che il computer possieda i seguenti requisiti minimi:

- sistema operativo Windows® Win7/Vista/XP;
- processore Intel® Pentium 4, 2.8 GHz o superiore;
- 1GB RAM o superiore;
- Standard USB 2.0 o superiore;
- Scheda video 512 MB o superiore;

Precauzioni

Per fare in modo che il vostro video ingranditore digitale lavori nelle migliori condizioni, per favore leggete con attenzione i seguenti consigli:

- Non esponete il dispositivo direttamente ad alte temperature o alla luce del sole;
- Tenere lontano l'ingranditore da umidità, pioggia, liquidi e sostanze chimiche;
- Non utilizzate l'ingranditore nelle vicinanze di apparecchiature elettroniche e attrezzature elettro-medicali che non possiedano una schermatura sufficiente.
- Utilizzate il dispositivo in un intervallo di temperature comprese tra 10 °C e 40°C;
- Assicurarsi che il dispositivo venga conservato a temperature comprese tra fra -20°C e +65°C;
- Non effettuate tentativi di riparazione e non tentate di aprirlo, perché perdereste la garanzia;
- Si prega di utilizzare la fonte di alimentazione corretta, sia da rete che a batteria, per preservare l'apparecchio da danni o guasti.
- Scollegare l'alimentatore e e rimuovere la batteria prima di pulire il video ingranditore. Utilizzate un panno morbido e pulito. Non usate solventi a base alcolica o altri liquidi per la pulizia.

Avvertimento:

Non utilizzate il video ingranditore durante la ricarica della batteria!
La superficie dei LED bianchi è molto calda, non toccateli!

Problemi e Soluzioni

Problema	Soluzioni
Schermo Nero	Premere a lungo il pulsante di accensione; Batteria scarica, in carica; Assicuratevi che l'obiettivo metta a fuoco i materiali di lettura (libri, giornali, ecc.)
Il dispositivo non si accende	Batteria scarica, richiede ricarica;
Niente suoni	Accertatevi che il volume sia regolato da 1 a 5 nel Menu Impostazioni;
Non mette a fuoco, l'immagine è sfocata	L'ambiente potrebbe essere troppo buio; Provate a premere una volta il pulsante di messa a fuoco di messa a fuoco; Assicuratevi di avere attivato la modalità di messa a fuoco manuale;
Immagine è troppo buia o troppo luminosa	Accertatevi che l'obiettivo sia a fuoco sul soggetto desiderato; Accertatevi di avere scelto l'obiettivo adatto al soggetto (obiettivo lontano/vicino) ;
L'immagine è sfocata o sporca	Pulire lo schermo LCD e la lente; Accertatevi di avere scelto l'obiettivo adatto al soggetto (obiettivo lontano/vicino)
Il testo visibile sullo schermo è troppo piccolo	Regolate l'ingrandimento con il pulsante +;
Non è possibile salvare le foto oppure appare un messaggio di errore della scheda di memoria (CARD ERROR)	Formattare la scheda di memoria oppure inserite una nuova scheda di memoria;

<p>Il video ingranditore è stato collegato alla televisione, ma non si vede nulla sullo schermo della TV.</p>	<p>Accertatevi che la TV sia accesa; Se state usando il cavo AV, selezionate sulla TV l'ingresso AV; Se state usando il cavo HDMI, selezionate sulla TV l'ingresso HDMI; Accertatevi che il cavo video sia stato collegato correttamente all'ingresso TV del video ingranditore e all'ingresso AV della TV.</p>
---	---